

TILLBEHÖR

Tångställ







Kraftigt ställ av rostfritt material med lyfthandtag.

När tångerna placeras i tångstället öppnas de automatiskt så att bästa desinfektion erhålles.

Tångstället har plats för 8 tänger och kan placeras direkt på brickbordet vid behandling.

Tidur

Lätt avtagbart tidur som visar upp-räkning alternativt nedräkning av desinfektionstid.

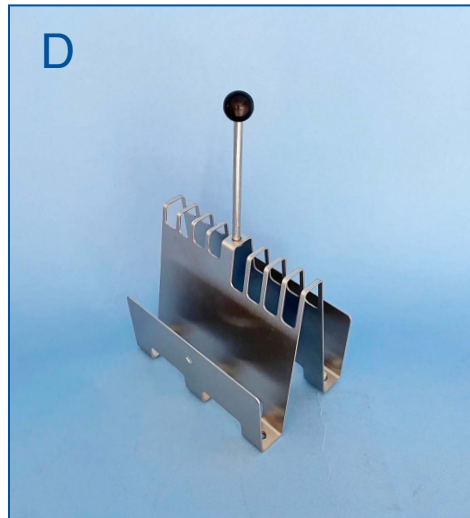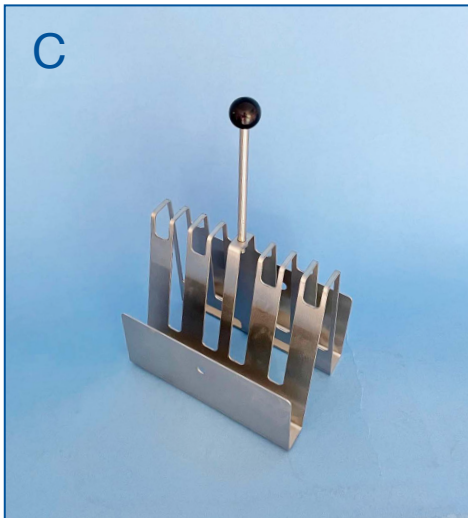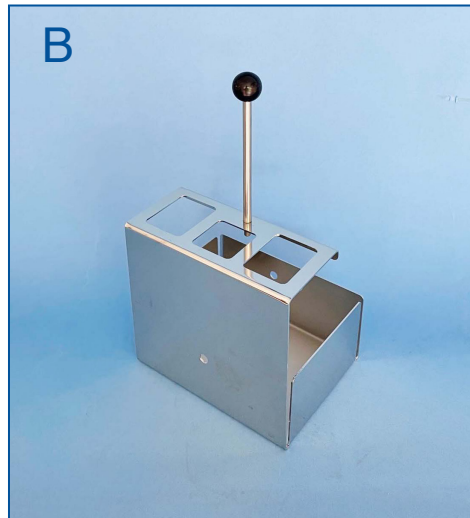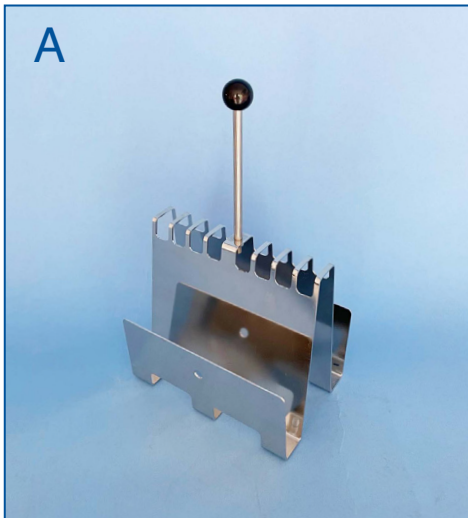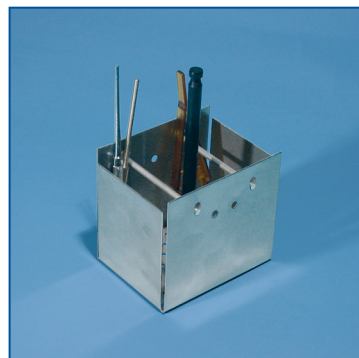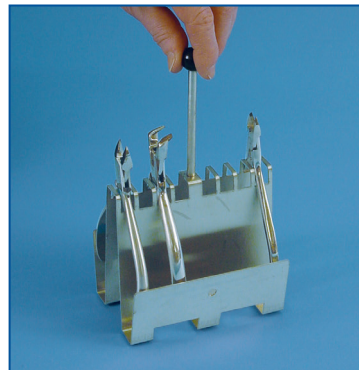

ORTHO CLEAN - Ett bekvämt och effektivt rengörings- och desinfektionssystem för ortodontitänger



ORTHO CLEAN - Ett rengöringssystem som motsvarar de idag högt ställda kraven



Ortho Clean

Tångrengörare - ett nytt hjälpmedel för enklare och effektivare rengöringsrutiner inom ortodonti. Genom möjlighet till rationell hantering erbjuder **Ortho Clean** en rad fördelar:

Bekvämt

Enklare arbete med rengöring och desinfektion av tänger och andra utensilier. Genom placering av **Ortho Clean** vid arbetsplatsen behöver orena tänger ej transporteras ut till sterilavdelningen för rengöring och desinfektion. Varje arbetsteam behåller sina tänger. Märkning av dessa, för att undvika sammanblandning, behövs ej.

Tidsbesparande

Samtidig rengöring och desinfektion av olika typer av tänger och utensilier. Ingen tidsödande och oergonomisk rengöring av ett och ett instrument. Tångstället har plats för 8 tänger och kan lätt lyftas ur respektive rengöringsbehållare utan att man kommer i beröring med desinfektionsvätskan. Byte av tångställ med rena respektive orena tänger sker enkelt och snabbt. Likaså växlingen mellan rengöring/desinfektion och torkning.

Renare/bättre miljö

Bättre arbetsmiljö genom användning av **Ortho Clean**. Till skillnad mot traditionell rengöring/desinfektion med öppna behållare då man får stor avdunstningsyta, sker rengöringen och torkningen av tångerna i **Ortho Clean** helt slutet, dvs. inga desinfektionsångor kommer ut i behandlingsrummet. Med **Ortho Clean** uppnås högradigt rena tänger utan att arbetsmiljön påverkas.

Enkel installation


Ortho Clean är mycket enkel att installera på vägg eller på insidan av exempelvis en skåpsdörr och tar endast lite utrymme i anspråk. Kräver ej anslutning till vare sig el, vatten eller andra media.



Ingenjörfirman Jan-Åke Hallén AB

Östra Fjällvägen 4 433 62 Sävedalen Tel. 031-33 67 660 E-mail info@jahallen.se www.jahallen.se

ORTHO CLEAN- aggregatets funktioner

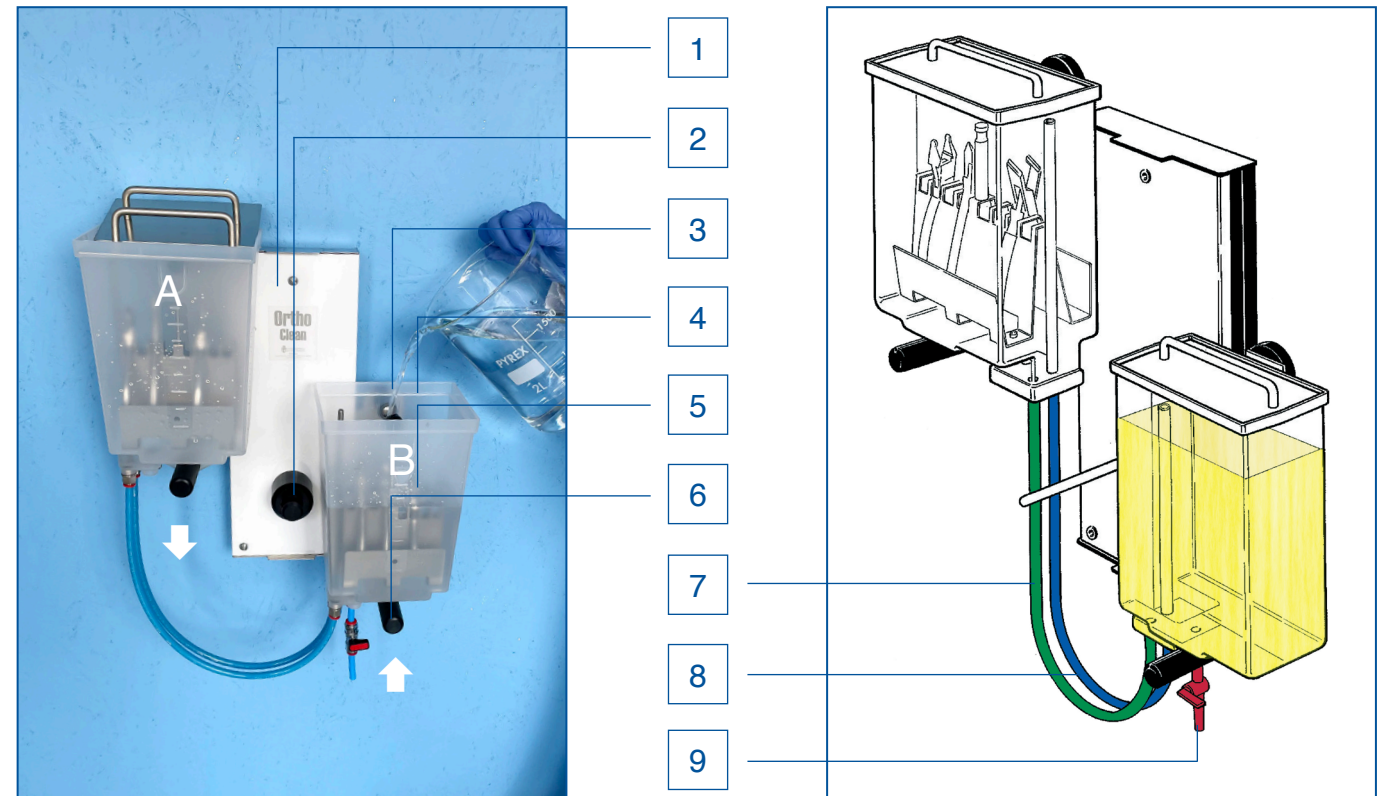

A Dropp- och torkläge

B Desinfektionsläge

1 Stativ av kraftig (robust) rostfri plåt.

2 Låsanordning för respektive läge på vätskebehållaren.

3 Vätskebehållare av kraftig, genomskinlig och graderad plast, lätt avtagbara för rengöring.

4 Plats för tättslutande lock med stort bygelhandtag (se behållare A). Här kan också tångställ placeras ovanpå, allt i rostfritt.

5 Tångställ av kraftigt, rostfritt material med rostfritt handtag.

6 Lättåtkomligt handtag för manövrering av vätskebehållarnas läge.

7 Desinfektionsvätskan flyttar sig genom denna slang från behållare A till behållare B.

8 Desinfektionsångorna passerar genom dessa slangar från behållare B till behållare A.

9 Lättåtkomlig avtappningskran vid byte av rengöringsvätska.

Ingenjörfirman Jan-Åke Hallén AB

Östra Fjällvägen 4 433 62 Sävedalen Tel. 031-33 67 660 E-mail info@jahallen.se www.jahallen.se