

BRUKSANVISNING



INSTRUMENT FÖR KONTROLL AV NÖDLUFTSVENTIL OCH VENTIL FÖR ATT FÖRHINDRA ÅTERINANDNING




Genom utveckling av ett helt nytt instrument kan man nu själv enkelt kontrollera att **nödluftsventilen** och **ventilen för att förhindra återinandning** fungerar som de ska (en gång/månad).

- 1 Vid kontroll av **nödluftsventilen** har man tidigare dragit in luft med munnen genom den korrigerade färskgas-slangen för att testa att den är tät..
- 2 Vid kontroll av **ventilen för att förhindra återinandning** har man tidigare blåst ut luft med munnen in i färskgas-slangen för att testa att den är tät..

Under Covid-tiden och med tanke på smittorisker av andra luftburna bakterier, virus och aerosoler har dessa båda tillvägagångssätt varit helt förkastliga.

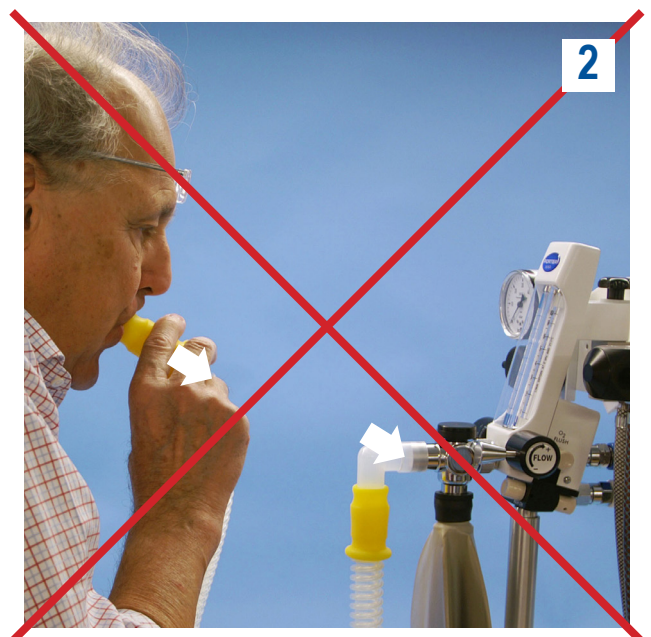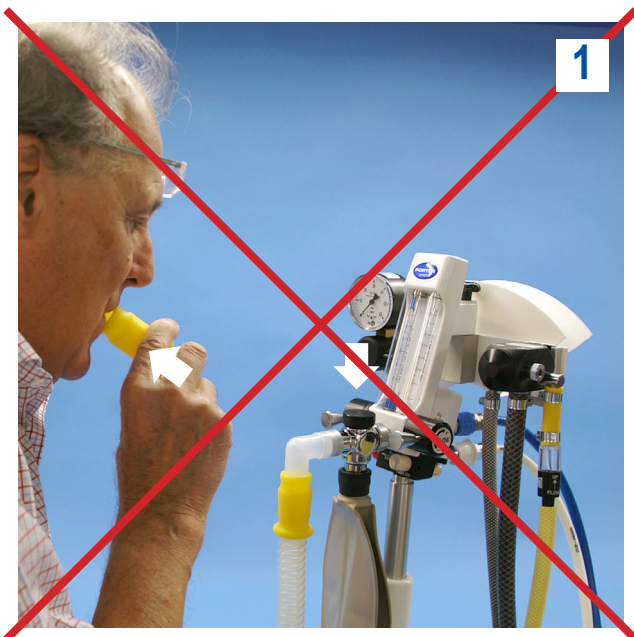

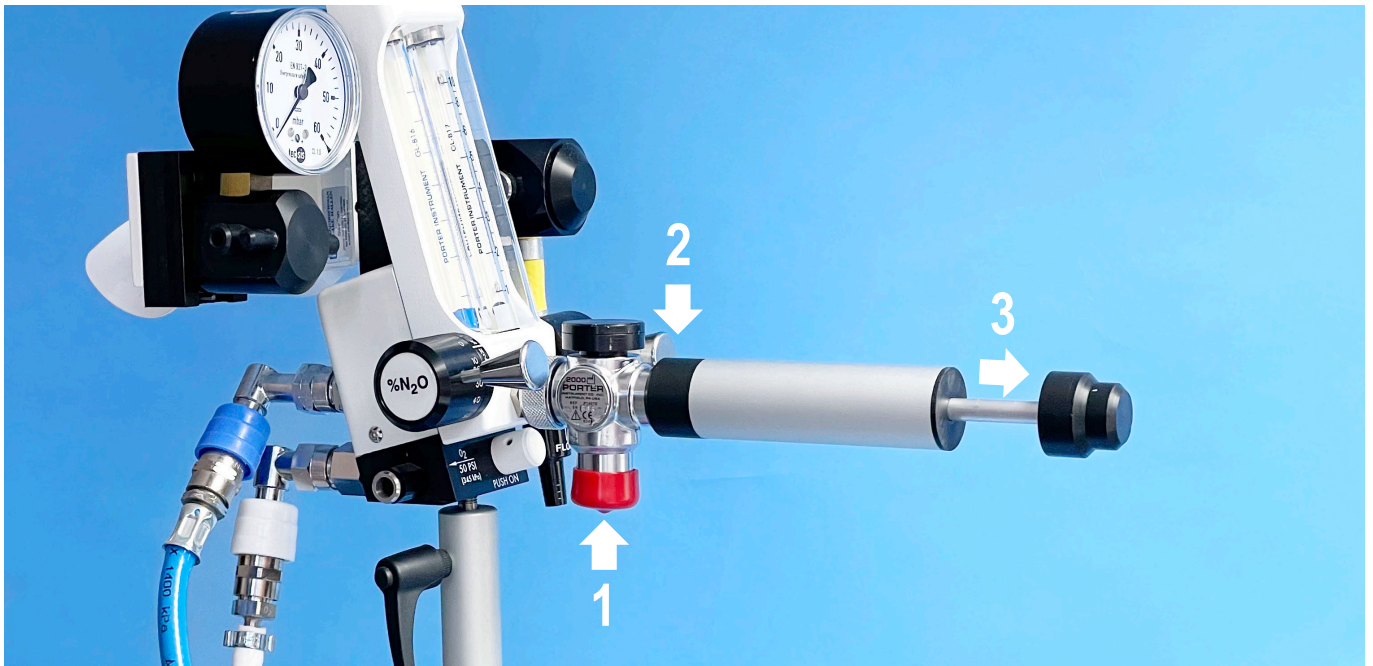

Med det nya kontrollinstrumentet gör man enligt följande:

- 1 Tillslut hålet för andningsblåsan på ventilstycket **med den röda förslutningen** så det blir tätt.
- 2 Anslut testinstrumentet ordentligt på ventilstycket.
- 3 Drag ut handtaget till max och släpp.

Handtaget skall nu stanna kvar i utdraget läge eller gå tillbaka mycket sakta om nödluftsventilen och ventilen för att förhindra återinandning är täta.

Om handtaget går snabbt tillbaka skall båda ventilerna kontrolleras och eventuellt bytas.

OBS!

När kontrollinstrumentet legat oanvänt en längre tid är det bra att vrida på handtaget (medurs) några varv och därefter dra ut och in det ett antal gånger innan användning.

OBS! Ibland kan det vara så att kanten runt anslutningen för andningsblåsan på ventilstycket inte håller tätt mot den röda förslutningen på grund av ojämnheter. Gör då istället så här:

- 1 Tryck på den röda förslutningen **med tummen** så det blir helt tätt.
- 2 Därefter drar man ut handtaget enligt tidigare instruktion.
- 3 Nu skall handtaget stanna kvar eller gå tillbaka mycket sakta om ventilerna är täta.

