


INSTRUMENT FÖR KONTROLL AV NÖDLUFTSVENTIL OCH VENTIL FÖR ATT FÖRHINDRA ÅTERINANDNING

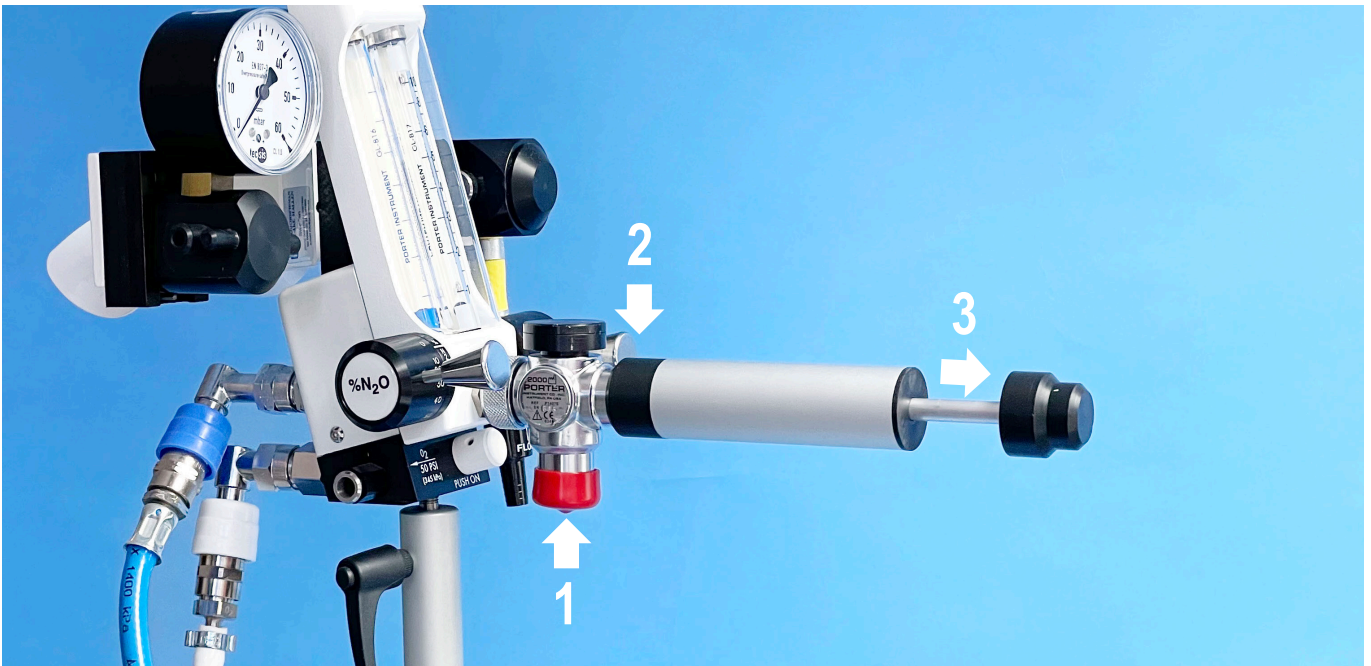

Äntligen!

Nu kan man själv på ett hygieniskt och enkelt sätt kontrollera att **nödluftsventilen** och **ventilen för att förhindra återinandning** fungerar som de skall göra.

Vid kontroll av **nödluftsventilen** har man tidigare dragit in luft med munnen genom den korrigerade färskgas-slangen för att testa att den är tät.

Vid kontroll av **ventilen för att förhindra återinandning** har man tidigare blåst ut luft med munnen in i färskgas-slangen för att testa att den är tät.

Under Covid-tiden och med tanke på smittorisker av andra luftburna bakterier, virus och aerosoler har dessa tillvägagångssätt varit helt förkastliga.

Med vårt nya kontrollinstrument gör man enligt följande:

- 1 Tillslut hålet för andningsblåsan på ventilstycket **med den röda förslutningen** så det blir tätt.
- 2 Anslut testinstrumentet ordentligt på ventilstycket.
- 3 Drag ut handtaget till max och släpp.

Handtaget skall nu stanna kvar i utdraget läge eller gå tillbaka mycket sakta om nödluftsventilen och ventilen för att förhindra återinandning är täta.

Om handtaget går snabbt tillbaka skall båda ventilerna kontrolleras och eventuellt bytas.

Ring oss gärna på tel. 031-33 67 660 eller maila på info@jahallen.se för mer information.